

# ESOXX<sup>®</sup> ONE

Dispositivo medico per il trattamento del reflusso gastro-esofageo

**Acido  
ialuronico**

**Condroitina  
solfato**

**Poloxamer  
407**

***una  
difesa  
originale  
e innovativa***

ALFASIGMA 

# ESOXX<sup>®</sup> ONE

Dispositivo medico per il trattamento  
del reflusso gastro-esofageo



Stick monodose

Dispositivo medico per il trattamento del reflusso gastro-esofageo

**INDICAZIONI:** ESOXX<sup>®</sup> ONE è un dispositivo medico ad azione meccanica che consente di ridurre rapidamente i sintomi correlati al reflusso gastro-esofageo quali: Pirosi, Dolore epigastrico, Rigurgito acido, Tosse irritativa, Disfonia.

La Malattia da Reflusso Gastro-esofageo, spesso abbreviata come MRGE (in inglese GERD, Gastro-Esophageal Reflux Disease), è caratterizzata da sintomi (pirosi, rigurgito acido, tosse irritativa, disfonia) che possono essere associati o meno a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea. La MRGE è in genere esacerbata dalla posizione supina, quindi i sintomi possono accentuarsi durante il riposo notturno.

ESOXX<sup>®</sup> ONE è una associazione di acido ialuronico e condroitin-solfato, in grado di esercitare un meccanismo di difesa della mucosa gastro-esofagea originale ed innovativo.

La presenza nella formulazione di ESOXX<sup>®</sup> ONE di un componente ad alta capacità bioadesiva (poloxamer 407), favorendo la permanenza del contatto con la superficie della parete esofagea dell'acido ialuronico e del condroitin-solfato, contribuisce all'effetto protettivo nei confronti dell'azione dell'acido cloridrico prodotto dallo stomaco.

Il condroitin-solfato possiede inoltre un'azione favorente i processi riparativi della mucosa gastro-esofagea.

**COMPOSIZIONE:** Acido ialuronico, condroitina solfato, polivinilpirolidone, xilitolo C, sodio benzoato, potassio sorbato, aromi, acqua demineralizzata, poloxamer 407.

**CONFEZIONE:** 20 stick (bustine monodose) da 10 ml.

**DOSI E MODALITÀ D'USO:** uno stick (bustina monodose) dopo i pasti principali e al momento di coricarsi o secondo consiglio medico.

**CONTROINDICAZIONI:** Nessuna in particolare, salvo casi di ipersensibilità nei confronti di uno dei suoi componenti. In tale circostanza interrompere il trattamento e contattare il proprio medico. Anche se non sono conosciuti effetti collaterali, si consiglia di non utilizzare il prodotto durante la gravidanza o nei primi mesi dell'allattamento. In ogni caso, consultare prima il proprio medico.

**AVVERTENZE:** Non eccedere la dose consigliata. Se le manifestazioni dovessero persistere consultare il proprio medico. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Fabbricante: Apharm srl - via Roma, 26 - 28041 - Arona – Italy

Distributore: **Alfasigma S.p.A.**  
Viale Sarca, n. 223 – Milano (MI)



0373

Rev. 02 del 08.2017